

# Kontaktpunkte ermitteln/analysieren

FBK | Zahntechnik | Projekt „Funktionelle Zahnflächen“ - LS1 - Level1 | Lernfeld 5 | Anatomie/Prothetik

**Bearbeite** diesen **Job to do**.

**Kontrolliere** anschließend mit der **Lösung**, ob du richtig gearbeitet hast.

**Markiere** dann alle wirklich erworbenen Kompetenzen in der **Checkliste**.

1. **Ermittle** mit **Okklusionsfolie** an dem im Unterrichtsraum zur Verfügung stehenden **Modellpaar** die **okklusalen Kontakte** in zentrischer Okklusion.

Als tatsächliche Kontakte gelten nur deutliche farbige Punkte der Okklusionsfolie und nicht kleine Farbtupfer durch zufällige Berührungen ;-).

2. **Zeichne** die mit den Modellen **ermittelten okklusalen Kontakte** in die Bilder des Modellpaares ein. A-Kontakte sollen gelb, B-Kontakte rot, C-Kontakte grün und Randleisten-Kontakte lila markiert werden

